



HSR

otoprotettori

SPECIALE CONTRIBUTO CALCHI

Scorri per leggere tutto



CONTRIBUTO CALCHI

PARI A 30 €

Sappiamo che la **rilevazione dei calchi** può causare incertezza nell'acquisto dei nostri otoprotettori su misura.

Al fine di incentivare l'utilizzo e l'acquisto di protezioni acustiche certificate e di alta qualità, abbiamo deciso di erogare un **contributo esclusivo** pari a **30 €** che corrisponde al costo medio necessario per realizzare i calchi presso un centro.

COME OTTENERE IL CONTRIBUTO?

Ottenere il contributo è semplicissimo.

Aggiungi i prodotti che intendi acquistare nel carrello. Prima di procedere al **checkout** (pagamento), dovrai inserire uno **speciale codice promozionale** che automaticamente detraerà il valore del contributo dall'importo totale del tuo acquisto.

Potrai successivamente utilizzare l'importo dato dal risparmio ottenuto, per **sostenere autonomamente il costo necessario alla rilevazione dei calchi** presso il centro specializzato che sceglierai.

Il codice promozionale da utilizzare è il seguente:

cu8hnhab

Ti invitiamo a scegliere il tuo dispositivo di protezione più idoneo alle tue esigenze.

Per qualsiasi ulteriore delucidazione, non esitare a contattarci inviando un messaggio di posta elettronica a

info@otoprotettori.eu

Buon acquisto!

ATTENZIONE: il contributo non si applica a determinati articoli o a prodotti che prevedono uno sconto.

PROCEDURA D'ACQUISTO OTOPROTETTORI SU MISURA

Tutti i nostri otoprotettori possono essere ordinati solo tramite il nostro negozio online e saranno consegnati direttamente al tuo domicilio entro 7 o 15 giorni lavorativi a partire dalla data di ricevimento delle impronte presso la nostra sede.

1

Effettua l'ordine direttamente dal nostro sito su www.otoprotettori.eu/store

2

Effettua le impronte presso un otorino/audiologo/otoprotesista oppure da un tecnico specializzato facendo attenzione che vengano realizzate esattamente come nella foto nella pagina successiva. Richiedi due diversi calchi per ciascun orecchio.

3

Inviaci le impronte (*non saranno restituite*) all'interno di un pacco rigido che le protegga adeguatamente durante il trasporto. Non dimenticare di indicare il numero d'ordine. Confermeremo il loro ricevimento e la loro idoneità (vedi pagina successiva), dopodichè avvieremo il processo di produzione.

Il processo non è chiaro?
Visita www.otoprotettori.eu/faq


ATTENZIONE: non inviare le impronte
prima di aver effettuato l'ordine!

COME EFFETTUARE LE IMPRONTE


Tutti gli otoprotettori sono **costruiti su misura** mediante le impronte del condotto uditivo.

HAI BISOGNO DI MAGGIORI INFORMAZIONI?

Visita la pagina FAQ del nostro sito internet all'indirizzo:
www.otoprotettori.eu/FAQ/ OPPURE

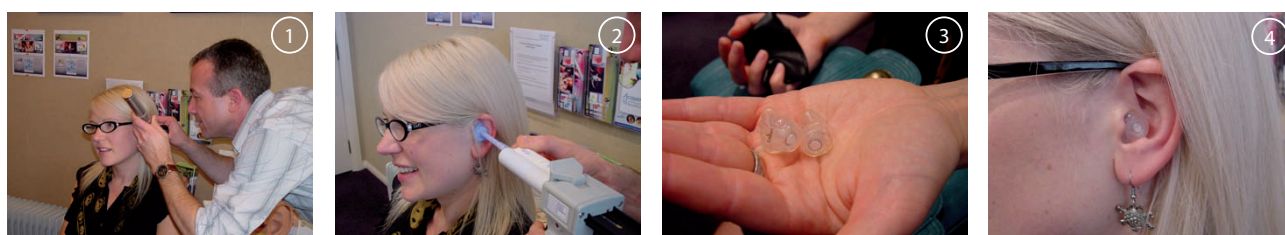

NOTA IMPORTANTE: gli otoprotettori hanno una ***durata di 4 anni***, dopodiché è necessario sostituirli per garantire un isolamento ottimale.

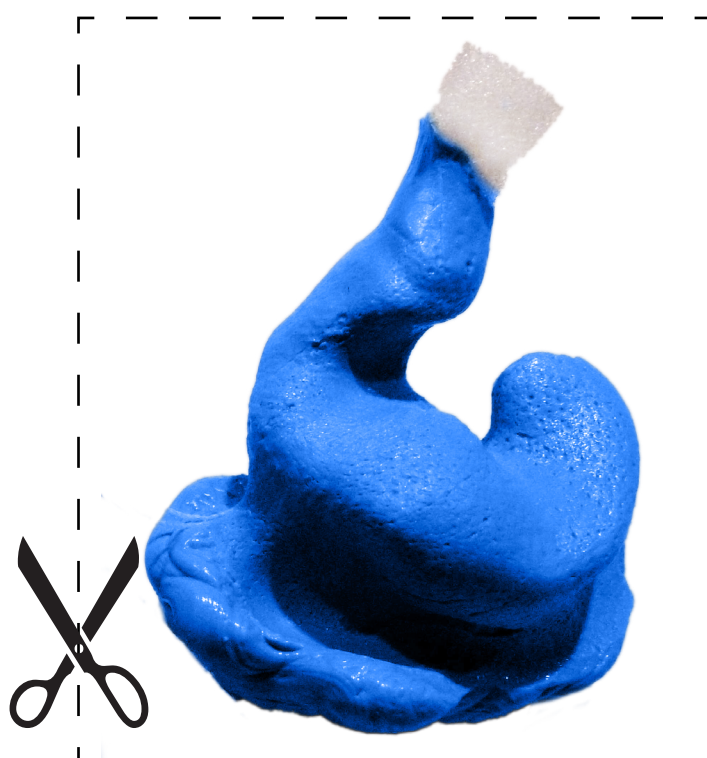

Esempio Impronta

ATTENZIONE!


È assolutamente necessario effettuare impronte **profonde e di ottimo livello** (stampare la foto di fianco e mostrarla a chi farà la rilevazione).

Non inviare le impronte prima di aver provveduto al pagamento dell'ordine.

COME EFFETTUARE I CALCHI


Stampare e consegnare al tecnico

Corrispondere il costo per la rilevazione direttamente al centro

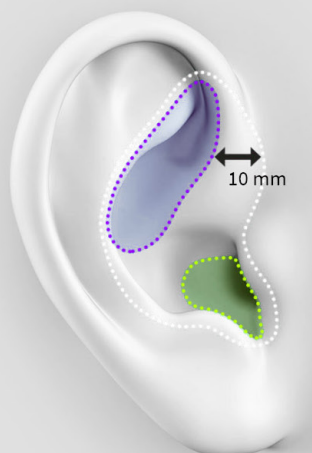

- Area totale del calco
- Riempire bene anche questa area
- Calco profondo fino alla seconda curva interna

**ESEGUIRE DUE
COPPIE PER CIASCUN
ORECCHIO ED
EFFETTUARE CALCHI
MOLTO PROFONDI**

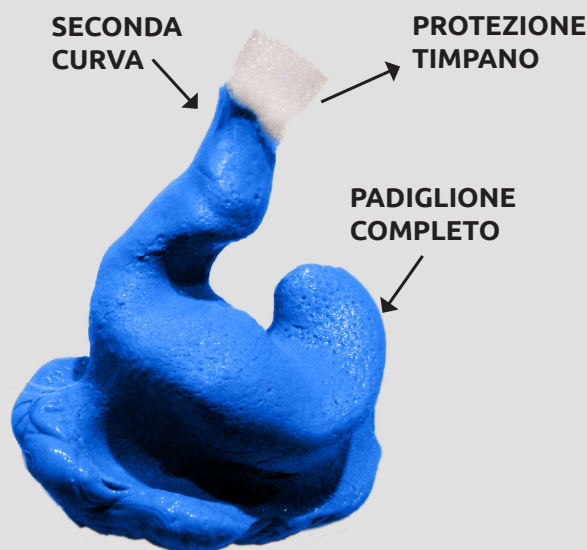

ATTENZIONE!

Se i calchi non saranno effettuati esattamente come quello in foto, non saremo in grado avviare la produzione dei tuoi otoprotettori.

Ricorda che l'operatività del tecnico che effettuerà l'impronta non è riconducibile ad alcuna responsabilità diretta di HSR Otoprotettori. **Comunicare il contatto di un centro è un servizio che offriamo gratuitamente a tutti i nostri clienti al solo fine di evitarne la ricerca in autonomia.**

In questo documento, attraverso foto e testi ben dettagliati, sono riportate istruzioni estremamente precise e puntuali su come devono essere correttamente realizzati i calchi per la produzione dei tuoi otoprotettori o in ear monitor su misura. Con l'aiuto del tecnico che realizzerà le tue due coppie di calchi, controlla bene che siano realizzati in conformità a quanto richiesto.

**VERIFICA I CALCHI
PRIMA DI LASCIARE IL CENTRO!**

HSR
otoprotettori

NUOVO SERVIZIO

RITIRO CALCHI

Se non riesci a spedire i tuoi calchi, utilizza il nostro servizio di ritiro a domicilio!

Aggiungi il prodotto all'interno del tuo carrello quando ordini i tuoi otoprotettori.

Penseremo a tutto noi!

Prepara un pacco che protegga bene le tue impronte e avvisaci subito non appena saranno pronte per il ritiro! Invieremo un corriere in massimo 48 ore^(*).



AGGIUNGI AL CARRELLO ONLINE:

<https://www.otoprotettori.eu/store/prodotto/spese-di-spedizione/>

(*)È necessario indicare un indirizzo presidiato dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

A black and white photograph of a woman's face in profile, looking upwards with her eyes closed. She is wearing a small, white, custom-molded in-ear monitor in her left ear. Her hand is gently resting under her chin.

**The most personal
connection between you
and your sound.**



In Ear Monitor Professionali

www.otoprotettori.eu/hearos